

Füllungen

| | |
|---|---|
| Mikrofüller Hybridkomposit Nano-Komposit Kompomere Ionomere | EVE DIACOMP PLUS Diamantpoliersystem für alle gängigen Komposite 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 3.000 - 8.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden |
| Gold / Amalgam | EVE EVEFLEX Poliersystem für EM-Legierungen und Amalgam 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden |

Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Gerüste, Verblendungen

| | |
|---|--|
| Silikatkeramik (Feldspat-, Leuzit-) Lithium-Disilikat CAD/CAM Keramik NEM-Legierungen | EVE DIAPOL Diamantpoliersystem für Keramiken 1. Stufe = Abtragen 2. Stufe = Glätten 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden |
| Zirkoniumdioxid Aluminiumoxid | EVE DIACERA Diamantpoliersystem für Oxidkeramiken 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden |
| Edelmetalle EM-reduzierte Legierungen | EVE EVEFLEX Poliersystem für Edelmetalle und NEM-Legierungen 1. Stufe = Glätten / Vorpulieren 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ Mit Wasserkühlung verwenden |

Teil-/ Vollprothetik

| | |
|-------------------------------|---|
| Prothesenkunststoffe Acryl | EVE TECHNIK Poliersystem für die Bearbeitung von Prothesenkunststoffen 1. Stufe = Abtragen 2. Stufe = Glätten 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden |
| Modellguss | EVE Chrom Plus Poliersystem für Chrom-Kobalt-Legierungen, Edelstahl, Titan 1. Stufe = Abtragen / Glätten 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 8.000 - 15.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden |


Provisorien-Kunststoffe


| | |
|------|---|
| PMMA | EVE SOFT WHEELS Imprägnierte Polierscheiben (Mini-Schwabbel) = Politur ohne zusätzliche Polierpaste = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ Ohne Wasserkühlung verwenden |
|------|---|


Universal


| | |
|---|---|
| Keramikwerkstoffe Edelmetalle Kunststoffe | EVE UNIVERSAL Universelles Poliersystem ■ 1. Stufe = Abtragen / Formen  empf. 7.000 - 10.000min ⁻¹ |
|---|---|

Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Gerüste, Verblendungen


| | |
|---|--|
| Keramik Universal CAD/CAM-Keramiken NEM-Legierungen | EVE DIAPOL Diamantpoliersystem für Keramiken, Verblendkeramiken ■ 1. Stufe = Abtragen ■ 2. Stufe = Glätten ■ 3. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ |
|---|--|


| | |
|----------------------------------|---|
| Zirkoniumdioxid Aluminiumoxid | EVE DIACERA Diamantpoliersystem für Oxidkeramiken ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Silikatkeramik (Feldspat-, Leuzit-) Lithium-Disilikat | EVE DIAPRO Diamantpoliersystem für Silikatkeramiken, CAD/CAM-Verblendungen ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ |
|---|--|


| | |
|--|--|
| Edelmetalle EM-reduzierte Legierungen | EVE EVEFLEX Poliersystem für Edelmetalle und NEM-Legierungen ■ 1. Stufe = Glätten / Vorpolieren ■ 2. Stufe = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 7.000 - 12.000min ⁻¹ |
|--|--|

Teil-/ Vollprothetik

| | |
|-------------------------------|---|
| Prothesenkunststoffe Acryl | EVE TECHNIK Poliersystem für die Bearbeitung von Prothesenkunststoffen ■ 1. Stufe= Abtragen ■ 2. Stufe= Glätten ■ 3. Stufe= Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------|---|
| Modellguss | EVE Chrom Plus Poliersystem für Chrom-Kobalt-Legierungen, Edelstahl, Titan ■ 1. Stufe= Abtragen / Glätten ■ 2. Stufe= Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 8.000 - 15.000min ⁻¹ |
|------------|---|

Provisorien-Kunststoffe

| | |
|------|--|
| PMMA | EVE SOFT WHEELS Imprägnierte Polierscheiben (Mini-Schwabbel) ■ = Politur ohne zusätzliche Polierpaste ■ = Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Polierpaste  empf. 5.000 - 7.000min ⁻¹ |
|------|--|